

Symphony pumpeprogrammer

Quickguide

Symphony brystpumpen med de forskningsbaserede pumpeprogrammer er udviklet specielt til at støtte mødre i hele mælkedannelsesprocessen: ved igangsætning, opbygning og opretholdelse af en tilstrækkelig mælkeproduktion.



Symphony har to pumpeprogrammer:

1 Programmet START støtter mødre med behov for brystpumpe i vellykket igangsætning af mælkeproduktionen. Programmet efterligner det uregelmæssige og hurtigere sug- og pausemønster hos et fuldbåret spædbarn i de første dages mælkeproduktion.

2 Programmet VEDLIGEHOLD er udviklet til at optimere mælkemængden, efter sekretorisk aktivering har fundet sted (mælken er løbet til), og for at opbygge og vedligeholde en tilstrækkelig mælkeproduktion. Programmet med 2-Phase Expression-teknologien efterligner et fuldbåret spædbarns sugemønster under etableret mælkeproduktion.

Dobbelt pumping anbefales, da det kan bidrage til at øge og vedligeholde mælkeproduktionen.



1 Programmet START

Brug programmet START umiddelbart efter fødslen:

I Indtil du har pumpet i alt mindst 20 ml ud i hver af de seneste tre pumpeforløb **ELLER**

I I de første fem dage. Hvis sekretorisk aktivering ikke har fundet sted efter fem dage, skiftes der til programmet VEDLIGEHOOLD.

Programmet START kører automatisk i 15 minutter med flere pauser. Det er vigtigt at gennemføre hele programmet. Når programmet er slut, viser displayet «Program udført». Pumpen slukker automatisk.

2 Programmet VEDLIGEHOOLD

Brug programmet VEDLIGEHOOLD efter sekretorisk aktivering:

I Når du har pumpet i alt mindst 20 ml ud i hver af de seneste tre pumpeforløb **ELLER**


I Fra dag 6, alt efter hvad der indtræffer først.

Fortsæt med at pumpe, indtil brystet føles godt tømt og blødt over det hele (Medela anbefaler en pumpetid på mindst 15 minutter). Pumpeprogrammet skal slås fra manuelt. Kontakt din ammerådgiver eller jordemor, hvis du får brug for flere oplysninger.




Bemærk: Denne quickguide erstatter ikke den almindelige brugsanvisning. Nærmere oplysninger kan findes i brugsanvisningen til Symphony.


1 START

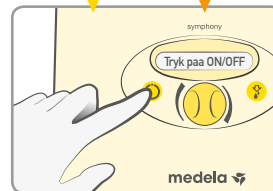


Tænd for brystpumpen (på tænd/sluk-knappen).

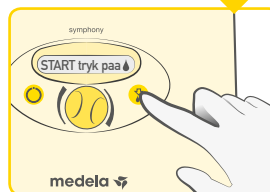


Tryk på dråbeknappen inden for 10 sekunder.

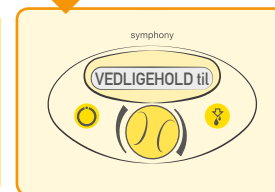

Stimuleringsfasen begynder. Brystpumpen skifter automatisk til udpumpningsfasen efter to minutter.

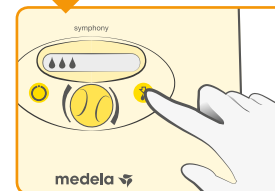

Hvis mælken begynder at løbe inden de to minutter, trykker du blot på dråbeknappen for at skifte til udpumpningsfasen.

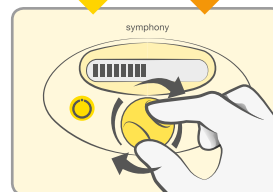

Indstil komfortvakuum: Drej indstillingsknappen til højre for at øge vakuum, indtil det er lidt ubehageligt. Drej derefter til venstre for at reducere vakuummet til det niveau, der er det maksimalt komfortable for dig.

